

POUR QUE LA VIE CONTINUE

AVEC LES DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES, IL N'A PAS BESOIN
D'ÊTRE PROFESSIONNEL POUR SAUVER
UNE VIE. PARTOUT!

HeartSave
PAD, AED, AS



LIFE

DEATH



UNE DÉCISION POUR LA VIE.



QUAND CHAQUE MINUTE COMPTE, LES DÉFIBRILLATEURS PRIMEDIC PEUVENT AIDER À FAIRE REPARTIR UN CŒUR QUI FIBRILLE. EN TOUS LIEUX ET À TOUT MOMENT! LA RAPIDITÉ DE VOTRE INTERVENTION EST DÉCISIVE.

UNE EXCELLENTE RENOMMÉE MONDIALE

Une technologie sophistiquée, une utilisation simple, une grande mobilité et une fiabilité absolue dans des conditions extrêmes: telles sont les caractéristiques incomparables des défibrillateurs PRIMEDIC. Ce n'est pas par hasard que ces appareils d'une robustesse à toutes épreuves jouissent d'une excellente renommée pour la médecine de réanimation et d'urgence.

DES DÉCENNIES D'EXPÉRIENCE

Au service de la technique médicale depuis 40 ans, notre entreprise produit en Allemagne des défibrillateurs automatiques, à la fois pour les professionnels et les non-professionnels. Grâce à notre étroite collaboration avec les cliniques et les utilisateurs de terrain, nous faisons évoluer les nouvelles technologies pour accroître la qualité de mise en oeuvre.

LA SÉCURITÉ GRÂCE À UNE IMPULSION DE DÉFIBRILLATION À COURANT CONTRÔLÉ

Le HeartSave permet d'agir immédiatement pour assurer la survie durant les minutes décisives jusqu'à l'arrivée des secours. Ces premières minutes sont capitales: Après cinq minutes à peine, les chances de survie se réduisent de plus de 50 %. Vous ne pouvez rien faire de mal! L'appareil délivre une défibrillation uniquement si une fibrillation ventriculaire a été effectivement décelée.

PRIMEDIC. Saves Life. Everywhere.

ARRÊT CARDIAQUE SOUDAIN – CHAQUE SECONDE COMPTE!

300 000 PERSONNES DÉCÈDENT CHAQUE ANNÉE D'UNE DÉFAILLANCE CARDIAQUE

En Europe, ce sont 300 000 personnes qui décèdent chaque année de mort cardiaque subite. Cela fait de cette dernière la première cause de mortalité, avant le cancer et l'accident vasculaire cérébral. Ce chiffre pourrait être bien plus faible si les établissements publics, les salles de sport, les services d'assistance, les entreprises, les établissements de formation ou les ménages, entre autres, étaient équipés d'un défibrillateur automatique (PAD, AED, AS). Sans assistance immédiate, un arrêt cardiaque soudain est mortel en l'espace de quelques minutes.

LA FIBRILLATION VENTRICULAIRE PEUT TOUCHER CHACUN DE NOUS

Dès le plus jeune âge, la fibrillation ventriculaire peut causer une mort cardiaque subite, et ce à tout moment, sans prévenir. Les scientifiques n'en connaissent pas suffisamment toutes les causes. Si la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) est l'un des premiers gestes à faire pour sauver le patient, elle ne suffit pas à elle seule pour éliminer la fibrillation ventriculaire. Seule une défibrillation pratiquée le plus rapidement possible, en intervenant avec une impulsion de défibrillation à courant contrôlé grâce à ce qu'on appelle un défibrillateur externe automatique (AED/DEA), peut stopper efficacement la fibrillation ventriculaire.

UN APPAREIL SÉCURISÉ QUI PROTÈGE LE MYOCARDE

La technologie de défibrillation biphasique de la famille HeartSave de PRIMEDIC protège le myocarde du patient. L'étape final d'impulsion génère une impulsion de défibrillation à courant contrôlé qui exclut des pics de courant nuisibles: un dispositif offrant protection et efficacité, tout en s'adaptant à chaque patient.




DE MEILLEURES CHANCES DE SURVIE GRÂCE À LA DÉFIBRILLATION PRÉCOCE

AGIR RAPIDEMENT POUR SAUVER DES VIES

Accompagnée d'une réanimation cardio-pulmonaire immédiate, une défibrillation pratiquée au plus vite est la seule option permettant de mettre fin à la fibrillation ventriculaire et ainsi de permettre la survie de la victime. Il est avéré que les chances de survie se réduisent de 10 à 12 % par minute.

GRANDE SIMPLICITÉ D'UTILISATION POUR LES UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS

Il ne reste au patient que quelques minutes pour être sauvé. C'est pourquoi nos défibrillateurs destinés aux premiers secouristes ont été spécialement conçus pour être utilisés par des personnes non professionnels. Avec des gestes simples, vous pouvez apporter une aide immédiate sans connaissances médicales. Erreurs d'utilisation sont exclues: l'appareil délivre une défibrillation uniquement si une fibrillation ventriculaire a été indentifiée. Des instructions vocales simples guident le premier secouriste tout au long de la procédure sauvetage.

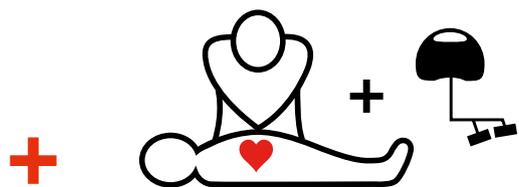

CHANCES DE SURVIE*

100-70%

EN CAS DE DÉFIBRILLATION EN
3 MINUTES



70-50%

EN CAS DE DÉFIBRILLATION EN
3 à 5 MINUTES



< 50%

EN CAS DE DÉFIBRILLATION EN
5 à 10 MINUTES




LES DIRECTIVES DE RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE SELON L'ERC

1




PERSONNE
INCONSCIENTE

2

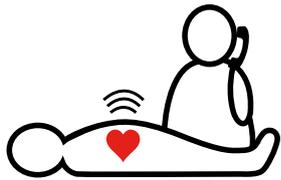


FAIRE L'APPEL
D'URGENCE

3

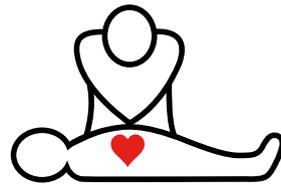


30 COMPRESSIONS :
2 VENTILATIONS

4

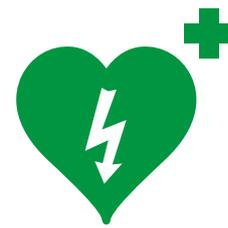

ALLER CHERCHER
L'AED (SE LE FAIRE
APPORTER)


5

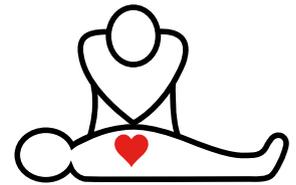

30 COMPRESSIONS :
2 VENTILATIONS

POURSUIVRE LES
COMPRESSIONS ET
LES VENTILATIONS
(30:2) JUSQU'À
DISPONIBILITÉ
DE L'AED


6

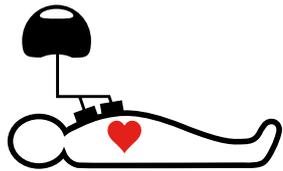

OUVRIR L'AED ET
DÉNUDER LE
THORAX DE LA
VICTIME ET Y
POSER LES
ÉLECTRODES

SUIVRE LES
INSTRUCTIONS
DE L'AED


7

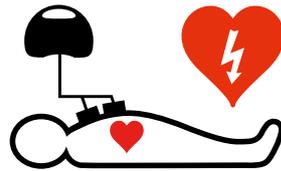

CHOC RECOMMANDÉ

1 CHOC


PROCÉDER IMMÉDIATEMENT
À 2 MINUTES DE RÉANIMATION
(30:2)

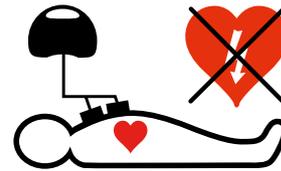

CHOC NON RECOMMANDÉ

PROCÉDER IMMÉDIATEMENT À
2 MINUTES DE RÉANIMATION
(30:2)

8

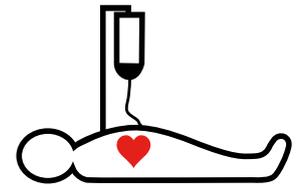

POURSUIVRE
JUSQU'À LA PRISE
EN CHARGE DU
PATIENT PAR
LE SERVICE DE
SECOURS!

APPAREIL SEMI-AUTOMATIQUE

HeartSave PAD

1 HAUT-PARLEUR
PAD de utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires (unilingues) et signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus d'utilisation.

2 BOUTON PÉDIATRIQUE
Défibrillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de l'ECG pédiatrique.

3 TOUCHE DE DÉCLENCEMENT
Après une analyse et un déverrouillage réussis, la défibrillation se déclenche par simple pression de la touche de déclenchement du choc.

4 PRISE DE RACCORDEMENT
Raccordement du câble des électrodes préconnecté.

5 AFFICHAGE DE L'ÉTAT
L'affichage actif de l'état informe l'utilisateur de la disponibilité de l'appareil et de l'état de la batterie. Un autotest quotidien permet de garantir la disponibilité de l'appareil.

6 COMPARTIMENT DE BATTERIE ET ACCÈS À LA SaveCard
Déverrouillage facile pour le remplacement de la batterie (durée de vie de 3 ans) et accès à la SaveCard. C'est sur cette carte mémoire amovible que l'appareil enregistre automatiquement toutes les données de la réanimation.



APPAREIL SEMI-AUTOMATIQUE HeartSave AED

1 HAUT-PARLEUR
DAE de utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires (en 4 langues) et signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus d'utilisation.

2 BOUTON PÉDIATRIQUE
Défibrillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de l'ECG pédiatrique.

3 TOUCHE DE DÉCLENCHEMENT
Après une analyse et un déverrouillage réussis, la défibrillation se déclenche par simple pression de la touche de déclenchement du choc.

4 PRISE DE RACCORDEMENT
Raccordement du câble des électrodes préconnecté.

5 AFFICHAGE DE L'ÉTAT
L'affichage actif de l'état informe l'utilisateur de la disponibilité de l'appareil et de l'état de la batterie. Un autotest quotidien permet de garantir la disponibilité de l'appareil.

6 COMPARTIMENT DE BATTERIE ET ACCÈS À LA SaveCard
Déverrouillage facile pour le remplacement de la batterie (durée de vie de 6 ans) et accès à la SaveCard. C'est sur cette carte mémoire amovible que l'appareil enregistre automatiquement toutes les données de la réanimation.

7 SÉLECTION DE LA LANGUE
Les instructions utilisateurs sont disponibles en plusieurs langues.



APPAREIL ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

HeartSave AS

1 HAUT-PARLEUR
AS de utilisation simple et intuitive grâce aux instructions vocales claires (en 4 langues) et signaux sonores lors du massage cardiaque tout au long du processus d'utilisation.

2 BOUTON PÉDIATRIQUE
Défibrillation pédiatrique selon Metrax GmbH base de données de l'ECG pédiatrique.

3 DÉLIVRANCE DE CHOC AUTOMATIQUE
Aucune touche de déclenchement, mais une consigne visuelle de ne pas toucher le patient.

4 PRISE DE RACCORDEMENT
Raccordement du câble des électrodes préconnecté.

5 AFFICHAGE DE L'ÉTAT
L'affichage actif de l'état informe l'utilisateur de la disponibilité de l'appareil et de l'état de la batterie. Un autotest quotidien garantir la disponibilité de l'appareil.

6 COMPARTIMENT DE BATTERIE ET ACCÈS À LA SaveCard
Déverrouillage facile pour le remplacement de la batterie (durée de vie de 6 ans) et accès à la SaveCard. C'est sur cette carte mémoire amovible que l'appareil enregistre automatiquement toutes les données de la réanimation.

7 SÉLECTION DE LA LANGUE
Les instructions utilisateur sont disponibles en plusieurs langues.



LA GAMME HeartSave DES AVANTAGES DÉTERMINANTS

Le HeartSave PARLE VOTRE LANGUE

Des instructions claires, disponibles en 40 langues différentes, vous guident de manière sécurisée tout au long du processus de sauvetage.

Le HeartSave EST RAPIDE

Dès que vous retirez le cache, l'appareil démarre automatiquement et l'analyse du rythme cardiaque débute immédiatement après placer les électrodes.

Le HeartSave EST FIABLE

Guidage clair et intuitif de l'utilisateur, autotests routiniers, protection contre les projections d'eau et la poussière (IP55), ainsi que contre le brouillard salin, et extrême robuste.

LA SÉCURITÉ AVEC LES MODÈLES HeartSave

► Technologie CCD éprouvée de PRIMEDIC

S'adapte à chaque patient et protège le myocarde.

► Gestion efficace des données

Toutes les données d'utilisation pertinentes (ECG, activations de touches, défibrillations) sont enregistrées et sont consultables immédiatement via le logiciel de lecture (AED, AS, en option sur PAD).

► Mise à jour simplifiée

Les mises à jour logicielles se font sans difficulté via la SaveCard (carte mémoire).

► Affichage clair de l'état

L'affichage actif de l'état indique immédiatement la disponibilité de l'appareil et l'état de la batterie.

► Capacité élevée de la batterie

Les batteries lithium hautement performantes avec la durée de vie de 3 (PAD) à 6 ans (AED, AS).



Vous souhaitez en savoir plus sur les gestes d'urgence à adopter avec le HeartSave? Vous trouverez ici de plus amples informations, telles que des données techniques, de la documentation ou la vidéo PRIMEDIC.



DES FORMATIONS POUR AGIR EN TOUTE SÉCURITÉ

POSSIBILITÉ DE STAGES D'ENTRAÎNEMENT PRATIQUES ET FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURISTES

Tous les défibrillateurs PRIMEDIC pour premiers secouristes sont très simples d'utilisation. Néanmoins, une formation approfondie et des stages d'entraînement réguliers permettent d'utiliser l'appareil de manière rapide et efficace en cas d'urgence. Pour les formateurs et les instructeurs, PRIMEDIC propose un appareil de formation AED testé sur le terrain et convivial, avec six scénarios tirés de la vie réelle. Autre avantage: les coûts d'exploitation de l'appareil sont faibles. Cet appareil de formation est disponible en version semi-automatique et entièrement automatique. La commande à distance aide le formateur à adapter le programme d'exercices des appareils de formation identiques à son cours et à confronter les participants à des situations inattendues.


SERVICE APRÈS-VENTE

NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS

- ▶ Service clients disponible par téléphone, e-mail ou sur site
- ▶ Possibilité de diagnostic à distance
- ▶ Contrôle de sécurité
- ▶ Mises à jour de l'appareil
- ▶ Possibilité pour l'utilisateur d'effectuer des mises à jour logicielles (recommandations ERC par ex.) en toute simplicité
- ▶ Accessoires disponibles sur stock
- ▶ Réparations
- ▶ Formations de maintenance pour les partenaires agréés

LA RELATION CLIENTS NOUS TIENT À CŒUR

Nous sommes toujours à votre disposition, même après votre achat! Nos collaborateurs sont expérimentés et s'investissent depuis de nombreuses années au service de nos clients PRIMEDIC, de même que nos partenaires: ils sont à votre entière disposition. Les techniciens de maintenance réalisent toutes les réparations de l'ensemble des

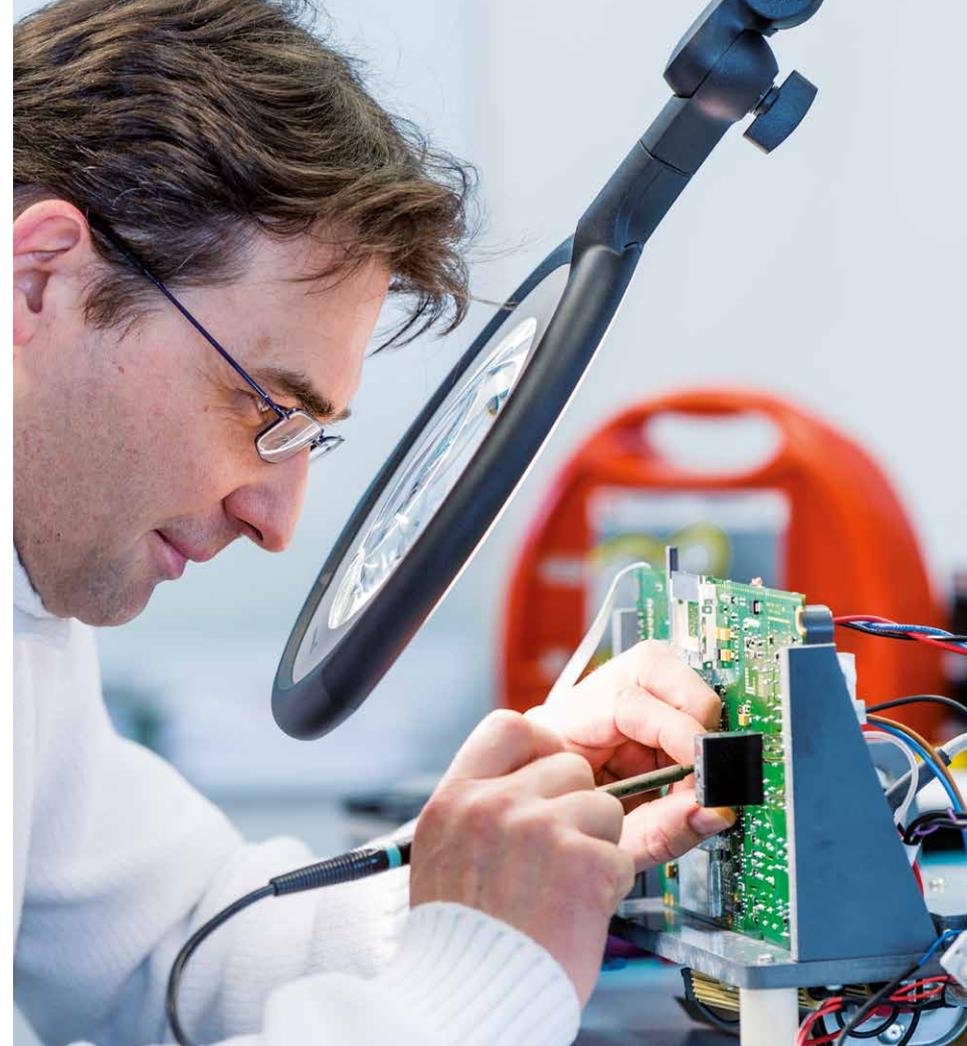

appareils de PRIMEDIC. Ils peuvent également se charger d'effectuer les contrôles de sécurité requis. Chez PRIMEDIC, la réactivité, la rapidité d'intervention, ainsi qu'une assistance technique chevronnée, joignable par téléphone et par e-mail, sont nos priorités. Pour couronner le tout, l'équipe de maintenance vous forme avec plaisir à la réalisation des contrôles techniques.

ACCESSOIRES

BATTERIE

Durée de vie de 3 ans sur PAD
Durée de vie de 6 ans sur AS, AED



SaveCard



ROTAID

Rotaid Plus avec et sans alarme



SaveBox

Fermeture magnétique incluse, avec fonction d'alarme en option (SaveBox Advanced)



SUPPORT MURAL

Agrément selon la norme EN1789



PLAQUES INDICATRICES



SavePads PreConnect

Accessoires inclus (rasoir, masque d'insufflation, ciseaux et gants)



SACOCHÉ



SACOCHÉ POUR ACCESSOIRES

AED vue de face



Siège / site de production

METRAX GmbH

Rheinwaldstr. 22

D-78628 Rottweil

Allemagne

Tél.: +49 741 257-0

Fax: +49 741 257-235

www.primedic.com

info@primedic.com

www.primedic.com



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.